


Eveline

smart ovulační test

Příručka

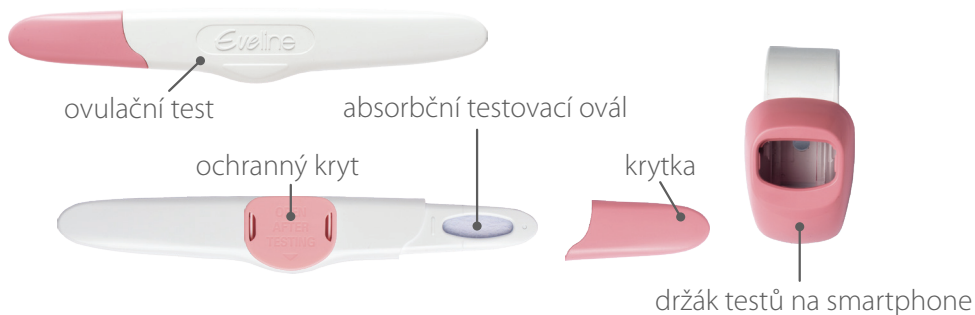

krok
1

Stáhni

V Google Play nebo App Store najdi aplikaci **Eveline** a nainstaluj si ji.



krok
2

Personalizuj

Následuj pokyny, aby sis správně **nastavila** aplikaci podle sebe.

krok
3


Vzorek

Odstraň **krytku** a umísti **absorbční testovací ovál** do proudu moči na 10 vteřin NEBO ponoř **absorpční testovací ovál** do čisté nádobky s močí. Umísti **krytku** zpět na **ovulační test** a nech ji horizontálně nebo **absorbčním testovacím oválem** dolů. Počkej **5 minut**.

krok
4

Nacvakni & vyrovnej


Klepni na tlačítko "Analyzovat nyní" a "Potvrdit" 5 minut. Odstraň **ochranný kryt** a připoj **ovulační test** na **držák testů na smartphone**. Pak jej nacvakni na svůj telefon. Klepni na tlačítko "Další" a postupuj podle pokynů pro zarovnání držáku.

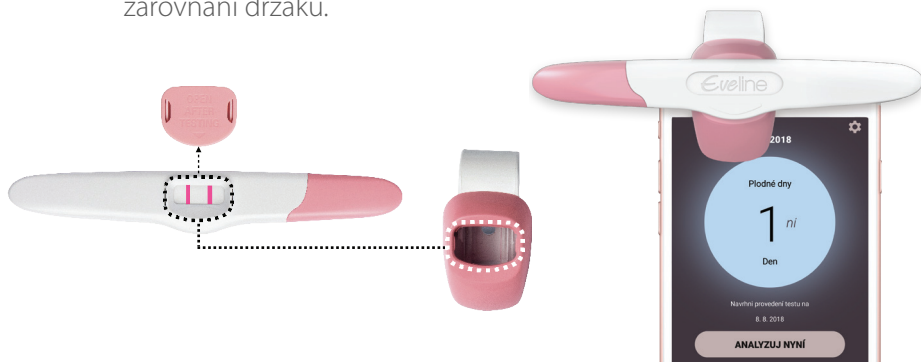

krok
5

Analyzuj

Jakmile je zelené pole viditelné, klikni na tlačítko Další, abys spustila testovací analýzu. Získej své výsledky a sdílej je, pokud chceš. Výsledky budou automaticky uloženy pro tvoje pozdější přezkoumání.

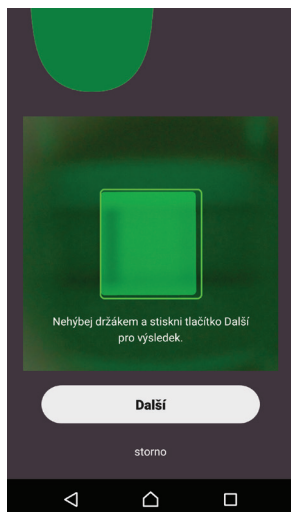

Nízká plodnost: Zobrazuje se během cyklu, pokud je hladina hormonů plodnosti nízká.



Vysoká plodnost: Zobrazuje se během cyklu, když tvoje hladina LH hormonu začne růst.



Nejvyšší plodnost: Zobrazuje se během cyklu, když tvoje hladina LH hormonu dosáhne vrcholu.