


Užívateľský manuál

iFertracker

Bezdrôtový teplomer WT703

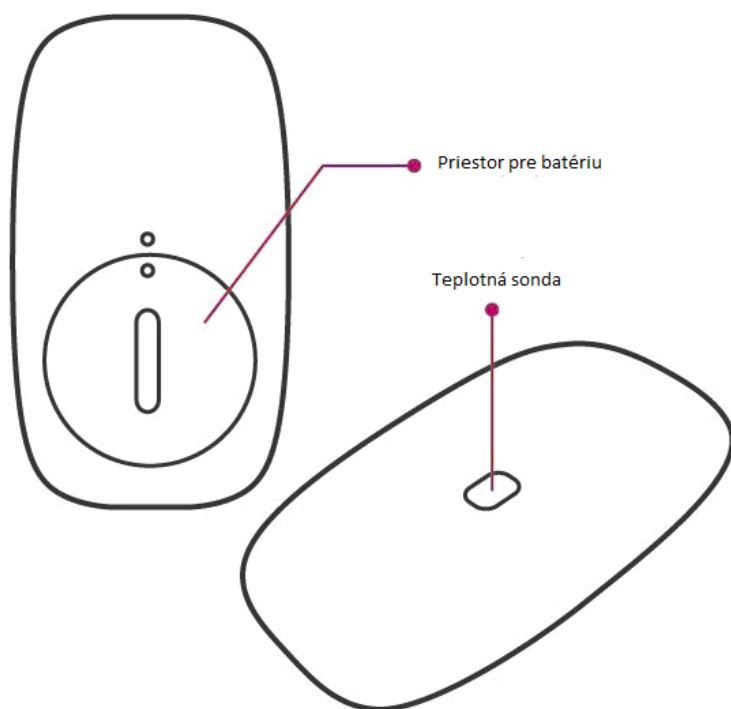

RAIING MEDICAL COMPANY

Obsah

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 01 Príslušenstvo | 11 Údržba |
| 02 Vloženie batérie | 12 Čistenie a dezinfekcia |
| 03 Stiahnutie aplikácie | 13 Technické špecifikácie |
| 04 Nastavenie spojenia | 14 Popis funkčnosti |
| 05 Nosenie | 15 Definícia symbolov |
| 06 Prevádzkové inštrukcie | 16 Zodpovednosť |
| 07 Riešenie problémov | 17 Vyhlásenie |
| 08 Preventívne opatrenia | 18 Autorské práva |
| 09 Predpokladané použitie | 19 Distribútor |
| 10 Aplikácia | |

Definícia významov:


- Teplomer / zariadenie: iFertracker.
- Prijímač: Smart zariadenia - kompatibilné s aplikáciou iFertracker a schopné prijímať signál z iFertrackera.

01 Príslušenstvo

- Batéria CR2025
- Nástroj na otváranie krytu batérie
- 1 balenie (30 ks /na 30 dní) lekárskeho náplasti
- Uživatelský manuál

02 Vloženie batérie


1. Otvorte priestor pre batériu (doprava)

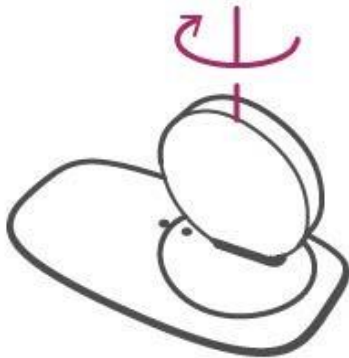

2. Vložte batériu CR2025



3. Zatvorte priestor pre batériu (dol'ava)

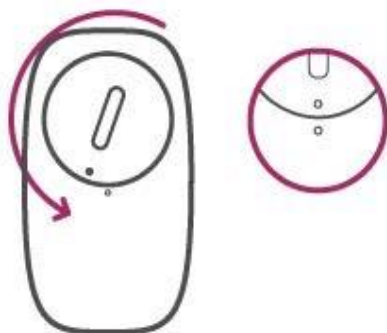

03 Stiahnutie aplikácie „iFertracker“

1. Aplikáciu nájdete na webovej stránke výrobcu:
<http://www.raing.com/iFertracker/download.php>



alebo v AppStore (Apple iOS):

<https://itunes.apple.com/us/app/ifertracker/id743927901?mt=8>

alebo v Google Play (Google Android):

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raing.ifertracker&hl=cs>

2. Stiahnite aplikáciu iFertracker a nastavte si užívateľský účet.



04 Nastavenie spojenia

Pre nastavenie spojenia zapnite na prijímači Bluetooth a vložte zapnutý teplomer do stredu obrazovky prijímača.



05 Nosenie

1. Príprava na nosenie



2. Nosenie iFertrackera



Poznámka:

Užívateľkám sa odporúča používať originálne náplastí a teplomer nosiť buď pri izbovej teplote alebo nižšej.

Pre získanie spoľahlivých dát je potrebné mať teplomer pripevnený celú noc (počas celej doby spánku).

V prípade alergickej reakcie pri použití náplastí konzultujte možnú náhradu so svojim lekárom.

3. Náplast' nepoužívajte opakovane. Ak sa náplast' odlepí alebo zničí, použite novú.

4. Pokožku v mieste nalepenia je potrebné vopred oholiť.
5. Uistite sa, že pokožka je v mieste nalepenia hladká a čistá.

06 Prevádzkové inštrukcie

1. Zapnutie /Vypnutie

- Zapnutie: Teplomer sa zapne automaticky po vložení do podpazušia (zapne sa telesnou teplotou).

· Prvé spárovanie

Ak používate teplomer prvýkrát, alebo ste vymenili batériu na novú, je potrebné pred prvým nosením teplomer najskôr zapnúť (podržať prst na snímači teploty až do momentu, keď začne blikať modrá dióda na zariadení) a následne spárovať teplomer s mobilnou aplikáciou v prijímači. Hneď potom je teplomer pripravený na použitie / nosenie.

- Vypnutie: Po odobraní z podpazušia, teplomer sa automaticky vypne.

2. Druhy LED indikácií

- 1 bliknutie / 1 sekundu znamená, že teplomer je nutné synchronizovať s prijímačom (pripojiť k prijímaču) .
- 1 bliknutie /4 sekundy znamená, že teplomer je zapnutý.

3. Časté spôsoby používania:

· Prvá synchronizácia dát s prijímačom:

- a. Zapnite prijímač a Bluetooth a presvedčte sa, že prístup na internet je povolený.
- b. Zapnite teplomer (stačí podržať prst na snímači teploty až do momentu, keď začne blikať modrá dióda na zariadení)
- c. Spustíte na prijímači mobilnú aplikáciu iFertracker a prihláste sa.

· Denné použitie:

1. Spanie s teplomerom: užívateľka by mala spať dlhšie ako 6 hodín a po celú dobu spánku mať pripevnený teplomer.
2. Ráno po prebudení odlepte teplomer a položte ho na stred obrazovky prijímača, ktorý už má spustenú aplikáciu iFertracker a zapnutý Bluetooth. Aplikácia iFertracker sa automaticky spojí s teplomerom, zosynchronizuje dáta a vykoná ich analýzu.
(Odporúčanie: aby užívateľka mala k dispozícii všetky potrebné informácie a nastavené pripomienky v pravý čas, odporúča sa synchronizáciu vykonávať každý deň).

07 Riešenie problémov

Symptóm	Pravdepodobný dôvod	Riešenie
Teplomer nejde zapnúť	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batéria je vybitá. 2. Zariadenie je poškodené. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vymeňte batériu. 2. Reštartujte zariadenie. 3. Kontaktujte zákaznícku podporu.
Nejde nadviazať spojenie medzi prijímačom a teplomerom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bluetooth na prijímači môže byť vypnutý. 2. iFertracker môže byť vypnutý. 3. iFertracker je mimo dosahu. 4. iFertracker je už spojený s prijímačom. 5. Nevykonali ste prvé spárovanie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapnite na prijímači Bluetooth. 2. Spustíte iFertracker. 3. Položte iFertracker na stred obrazovky prijímača. 4. Skontrolujte, či iFertracker nie je pripojený k inému prijímači. Pokiaľ áno, odpojte ho. 5. Preved'te prvé spárovanie.
Neboli nahrané žiadne teplotné dáta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Po vložení novej batérie ste nevykonali prvé spárovanie s prijímačom. 2. Doba merania teploty bola príliš krátka. 3. Kontaktná plocha kože nebola rovná alebo čistá. 4. Slabá batéria. 5. Omylom bolo prevedené pripojenie k prijímači behom nosenia, dáta už boli prenesené. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na prijímači spustíte aplikáciu iFertracker a spárujte prijímač s teplomerom. 2. Teplotu je nutné merať minimálne 6 hodín. 3. Skontrolujte umiestnenie teplomeru na tele. 4. Vymeňte batériu. 5. Pokiaľ sa Vám toto stáva často, odporúčame počas merania teploty vypínať na prijímači Bluetooth.

08 Preventívne opatrenia

Aby ste sa vyhli prípadným problémom, dodržujte nasledujúce opatrenia pri používaní teplomera:

- Varovanie: akákoľvek modifikácia teplomera je zakázaná.
- Nepoužívajte zariadenie pri CT vyšetrení (pri počítačovej tomografii).
- Nebezpečenstvo výbuchu: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých anestetických plynov.
- Dáta zo zariadení nenahrádzajú lekársku diagnózu, môžu ju iba doplniť.
- Občas skontrolujte, či zariadenie správne prilieha na kožu. V inom prípade dáta môžu byť nesprávne.
- Namáčanie zariadenia do tekutín alebo dezinfekcia môžu viesť k nepresným dátam alebo k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nestláčajte. V prípade, že plastový obal je poškodený, prestaňte zariadenie používať.
- Venujte pozornosť prevádzkovej teplote a vlhkosti (pozri Technické špecifikácie). Nesplnenie prevádzkových podmienok môže viesť k zlyhaniu merania.
- Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie.
- Ak je potreba, vykonajte aktualizáciu mobilnej aplikácie z App Store alebo Google Play.
- Je takmer vylúčené, aby aplikácia iFertracker bola nekompatibilná s inými aplikáciami vo Vašom prijímači. Ak sa tak stane, dajte nám vedieť.
- Zariadenie nie je sterilné.

- V prípade, že zariadenie nebudete používať dlhšie ako 1 mesiac, vyberte z neho batériu.

09 Predpokladané použitie

Bezdrôtový teplomer je zariadenie na batériu, ktorým sa meria ľudskú telesnú teplotu v podpažnej jamke. Poskytuje bezdrôtový prenos nameraných dát do prijímača - meranie / monitoring ľudskej bazálnej teploty.

Zariadenie je možné používať opakovane a je určené pre monitoring bazálnej teploty žien, ktoré si želajú otehotnieť.

10 Aplikácia

Zariadenie je možné používať opakovane a je určené k monitoringu bazálnej teploty dospelých žien. Môže byť používané doma alebo v nemocnici.

Nie je určené pre používanie na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo v akýchkoľvek núdzových situáciách.

11 Údržba

- Keď sa objaví notifikácia o slabej batérii v mobilnej aplikácii, vymeňte batériu na novú. Inak zariadenie nemusí fungovať korektne.
- Pravidelne čistíte povrch zariadenia 75% roztokom lekárskeho alkoholu.
- Skladovacia teplota by mala byť 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F), vlhkosť 10% ~ 85% a barometrický tlak 70kPa ~ 106kPa.
- Vyradenie zariadenia na konci jeho životnosti (vrátane batérie) by malo byť v súlade s miestnou legislatívou a reguláciami.

Poznámka: Okrem výmeny batérie, nie je potrebná žiadna iná údržba či kalibrácia.

12 Čistenie a dezinfekcia

Teplomer treba čistiť a dezinfikovať, nie je však nutné, aby bol sterilizovaný. Riad'te sa pokynmi uvedenými nižšie:

Očist'ite povrch zariadenia 75% roztokom lekárskeho alkoholu pred a po každom použití.

Použitie iných čistiacich prostriedkov ako alkohol môže poškodiť alebo skrátiť životnosť zariadenia či spôsobiť bezpečnostné riziko.

Nenamáčajte zariadenie do tekutín.

Zariadenie nesterilizujte.

Varovanie

Ak si všimnete zmenu alebo poškodenie na teplotnom snímači, prestaňte zariadenie používať.

13 Technické špecifikácie

Názov produktu: Bezdrôtový teplomer iFertracker
--

Model	WT703
Rozmery	55.6mm × 31.6mm × 6.5mm
Váha	6g (bez batérie)
Presnosť pomerov	±0.05°C (35°C -38.5°C) ±0.1°C (25°C -34.99°C & 38.51°C - 45°C)
Jednotky teploty	°C, °F
Prijímač	Podpora Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart; BLE). <ul style="list-style-type: none">○ iOS 6.1 a vyšší (iPhone 4S, iPad3, iPad mini, iPod touch 5 a vyšší)○ Android 4.3 a vyšší
Batéria	CR2025 (3V)
Výdrž batérie	60 dní, 8 hodín denne
Prevádzkové podmienky	Teplota 5°C - 40°C; vlhkosť 15% - 85%; barometrický tlak 86kPa - 106kPa

14 Popis funkčnosti

1. Zobrazenie bazálnej teploty:

Po vykonaní synchronizácie, je v aplikácii iFertracker možné kedykoľvek zobraziť jednotlivé namerané hodnoty alebo výslednú krivku bazálnej teploty.

2. Indikácia nízkeho napätia:

Ak napätie batérie klesne pod hodnotu 2.7V, zobrazí sa ukazovateľ slabej batérie. V tom prípade vymeňte batériu.

15 Definícia symbolov

Pred použitím si prečítajte manuál:



Sériové číslo:



Zariadenie je typu BF :



Výrobca:



Recyklovateľné:



Nevhadzujte do komunálneho odpadu:



ROHS Certifikácia:



1. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení:
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, a tým pádom aj vyhýbať sa dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

16 Zodpovednosť

Tento manuál bol spísaný v súlade s aktuálnymi dostupnými informáciami a tie sa môžu bez upozornenia zmeniť. Raiing Medical Company využila pri písaní tohto materiálu najaktuálnejšie dostupné informácie. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za stratu alebo poškodenie výrobku, ktoré by bolo spôsobené zanedbaním v manuáli, nepresnosťou alebo typografickou chybou. Nezrovnalosti v tomto manuáli môžu spôsobiť softvérové aktualizácie. Údaje v software sú prvoradé. V prípade vylepšenia produktu alebo zmeny technológie, môžete navštíviť webovú stránku technickej podpory spoločnosti pre zistenie adekvátnych informácií. Značka Bluetooth, označenie Bluetooth, kombinačná značka, Bluetooth Smart a Bluetooth Smart Ready sú ochranné značky spoločnosti Bluetooth SIG a

akékoľvek ich použitie spoločnosťou Raiing Medical Company je licencované. Ostatné ochranné značky a obchodné názvy patria svojim vlastníkom.

17 Deklarácia

1. EMC (elektromagnetická kompatibilita) produktu je v súlade s normou IEC60601-1-2 (štandard pre elektronické lekárske zariadenia).
2. Materiál, ktorý je v kontakte s kožou, je netoxický, nedráždivý a je v súlade s normou ISO10993-1;-5;-10.

18 Autorské práva

Všetky práva vyhradené © Ring Medical Company. Práva sa vzťahujú na tento manuál, jeho revíziu a konečnú interpretáciu. Práva na slovenský preklad patria "3M Devices - Lukáš Rejchrt". Bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, šírenie alebo preklad tohto manuálu alebo akejkoľvek jeho časti. Všetky práva vyhradené!



- Product Name:** Wireless Thermometer
- Model:** WT703
- Výrobca:** Raiing Medical Company
- Adresa registrácie:** Building #2, No.7 Chuangxin Road, Tech Park, Changping District, Beijing, China.
- Adresa výrobcu:** Building #2, No.7 Chuangxin Road, Tech Park, Changping District, Beijing, China.
- Servisný telefón:** 0086-10-64118658

19 Distribútor

Distribútor pre Slovenskú republiku:

3M Devices – Lukáš Rejchrt
Tel: +420 732 809 178
Email: info@raiing.cz
Web: www.raiing.cz